

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21007 _MATERASSO VISCOFLEX LP TALLONI_P161MFPPMHI

NOME PRODOTTO MATERASSO ANTIDECUBITO VISCOFLEX CON INSERTO A BASSA PRESSIONE NELLA REGIONE DEI TALLONI

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

I materassi Viscoflex sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione. Prodotto in polimero Viscoelastico ad alta densità (80 kg/m³), stampato su base in poliuretano ad alta resilienza (40 kg/m³), anatomicamente sagomato. Spessore del viscoelastico di 6 cm su tutto il materasso e 8 cm nella zona sacrale per maggior protezione del paziente. Garantisce una lunga durata ed è in grado di memorizzare la sagoma del corpo, ciò permette di aumentare la superficie di contatto riducendo le pressioni sui singoli punti di appoggio. L'inserto in viscoelastico bianco in corrispondenza della regione dei talloni risulta molto più morbido rispetto al viscoelastico blu e permette di scaricare meglio i picchi di pressione nelle regioni dei talloni. Perfettamente articolabile con le articolazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di areazione. Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali. Angoli arrotondati, utili per alloggiamenti. L' "effetto pelle" protegge da aggressioni esterne anche meccaniche. Fornito completo di copertura Polymaille® integrale bi-estensibile, impermeabile ma traspirante che assicura il massimo comfort ed una perfetta ventilazione mantenendo la temperatura corporea costante.

DESTINAZIONE D'USO Indicato per pazienti a medio-alto rischio di piaghe da decubito o con lesioni fino al III stadio (EPUAP).

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P161MFPPMHI	Materasso Viscoflex in materiale viscoelastico con 1 inserto a bassa pressione per talloni 90x200xh.14 cm. con copertura Polymaille 1.IM BD/RDM: 873274 CND: Y033306
P452PM	Telo Polymaille integrale per Viscoflex e Polyplot 90x200x14 cm BD/RDM: N.A. CND: N.A.
P101M20	Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y033306



INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	87x197xh.14 cm
Peso	15,8 kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Poliuretano espanso - 40 kg/m ³
Materiale/Densità della parte in Viscoelastico	Materiale Viscoelastico a memoria di forma ad alta densità - 80 kg/m ³
Materiale della Copertura	Polymaille - Trama di tessuto bielastico impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapor d'acqua e traspirante trattato contro i microrganismi.
Permeabilità della Copertura	>500 gr/m ² /24h
Portata Terapeutica	130 kg
Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Schiuma: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciare asciugare all'aria. Disinfettare con prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Copertura Polymaille: lavare a 95°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco mediante solventi di tipo P, asciugare a temperature moderate in asciuga biancheria.
CFC	Completamente assente
Lattice	free
Confezionamento	Il prodotto viene confezionato in busta di cellophane e inserito in scatola di cartone



Accessori e Ricambi

Cod. P452PM Telo Polymaille integrale per Viscoflex 90x200x14 cm. Cod. P101M20 Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90x200x14 cm.

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio