

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21015_CUSCINO ANTIDECUBITO POLYAIR LOW_P301CXXXX1HW

NOME PRODOTTO CUSCINO ANTIDECUBITO POLYAIR LOW

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Cuscino a bolle d'aria a microinterscambio composto da celle pneumatiche a nido d'ape suddiviso in due settori (destra e sinistra) ognuno dotato di valvola laterale per il gonfiaggio tramite manometro con monopalla. Tale suddivisione dei settori d'aria (destra e sinistra) permette il gonfiaggio differenziale e il bilanciamento dello squilibrio pelvico. Un esclusivo regolo permette di combinare il peso del paziente con la circonferenza del gluteo e di individuare la pressione per il corretto gonfiaggio.

La copertura integrale in trama di poliestere con induzione di poliuretano è ipoallergenica e biestensibile, impermeabile ai liquidi, ma contemporaneamente permeabile al vapore d'acqua. Adatta per paziente con incontinenza, dotata di zip su tre lati e di base antiscivolo. Riduce le forze di taglio ed aiuta la pelle a traspirare; gli occhielli laterali permettono di inserire le valvole all'interno del cuscino dopo il gonfiaggio e facilitano il passaggio dell'aria tra l'interno e l'esterno del cuscino riducendo gli effetti della macerazione cutanea.

Indicazioni d'uso: i cuscini Polyair sono indicati in pazienti in cui è già presente una lesione da pressione (stadio I-IV) oppure in pazienti con rischio alto-molto alto di sviluppo di lesioni da pressione (scale di valutazione Norton, Braden, Waterlow). Indicato anche per pazienti con pregresse piaghe da decubito nella zona della seduta e/o pazienti con paralisi complete o incomplete del tronco o delle parti inferiori e/o con handicap o deficit sensoriali delle parti inferiori del tronco e/o deficit di stabilità frontale-laterale e/o con asimmetrie posturali o sbilanciamento pelvico.

Materiali:

Celle a nido d'ape in Laxprene, materiale altamente resistente alle forze di taglio e stiramento.

Copertura integrale: Poliuretano ipoallergenico, impermeabile, traspirante, bielastico con base antiscivolo.

Altezza delle celle: 6 cm

Confezionamento: il cuscino è confezionato in scatola di cartone e preventivamente avvolto in cellophan trasparente, dotato di kit completo per la riparazione delle celle.

Disinfezione e decontaminazione: disinfettare usando prodotti spray a freddo (ammonio quaternario, glutaraldeidi ecc.)

Pulizia della copertura: lavaggio a 40°C, non usare candeggina, non stirare. Pulire a secco con solventi tipo P. Asciugabiancheria a moderate temperature. Compatibile coi requisiti ospedalieri (lavabile oltre i 90°C).



GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P301C36361HW	Cuscino Polyair Low Dimensioni cm.40x40 h. 6 Portata Max Paziente: 60 kg BD/RDM: 65923/R CND: Y033303
P301C40401HW	Cuscino polyair Low Dimensioni cm.40x40 h. 6 Portata Max Paziente: 80 kg BD/RDM: 65923/R CND: Y033303
P301C40431HW	Cuscino polyair Low Dimensioni cm.40x43 h. 6 Portata Max Paziente: 90 kg BD/RDM: 65923/R CND: Y033303
P301C43431HW	Cuscino polyair Low Dimensioni cm.43x43 h. 6 Portata Max Paziente: 110 kg BD/RDM: 65923/R CND: Y033303
P301C46461HW	Cuscino polyair Low Dimensioni cm.46x46 h. 6 Portata Max Paziente: 140 kg BD/RDM: 65923/R CND: Y033303
P301C51461HW	Cuscino polyair Low Dimensioni cm.51x46 h. 6 Portata Max Paziente: 160 kg BD/RDM: 65923/R CND: Y033303
P301C51501HW	Cuscino polyair Low Dimensioni cm.51x50 h. 6 Portata Max Paziente: 180 kg BD/RDM: 65923/R CND: Y033303

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I



SPECIFICHE TECNICHE

Portata massima	180 Kg
------------------------	--------

Accessori e Ricambi

Cod. P501PA4040W Copertura per "POLYAIR LOW", dimensioni cm.40x40 Cod. P501PA4043W Copertura per "POLYAIR LOW", dimensioni cm.40x43 Cod. P501PA4343W Copertura per "POLYAIR LOW", dimensioni cm.43x43 Cod. P501PA4646W Copertura per "POLYAIR LOW", dimensioni cm.46x46 Cod. P621A Kit di riparazione Cod. P624A Manometro di gonfiaggio con monopalla

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio